

PUSAT LAYANAN  
Call Center : 0800-11-TURBO (88726)

### **Model (YTD88)**

#### **Metode Operasi :**

Pertama-tama taruh barang-barang yang akan di sterilisasi pada lapisan rak yang sesuai. Kemudian tutup pintu kabinet, nyalakan daya hingga lampu indikator daya menyala, pastikan UV Sterilization Cabinet telah dalam mode *standby*. Pilihlah fungsi yang sesuai dengan yang Anda inginkan.

#### Mode Layar Sentuh :

1. Pertama-tama letakkan barang-barang yang akan disterilisasi pada lapisan rak yang sesuai.  
Semakin atas semakin kuat proses sterilisasi sehingga membutuhkan waktu yang lebih singkat.  
Sinar UVC hanya efektif bila sinarnya langsung mengenai permukaan produk.
2. Nyalakan daya dari cabinet sampai lampu indicator menyala. Kabinet UV Sterilizer sudah dalam mode STANDBY.
3. Pilihlah fungsi yang sesuai dengan yang anda inginkan,
4. Tekan tombol "Sterilize" satu kali untuk lama sterilisasi "30" menit, dua kali untuk "60" menit, tiga kali untuk "5" menit, dan empat kali untuk "15" menit, Setelah waktu sterilisasi berkedip 3 kali maka kabinet akan mulai bekerja dan waktu akan menghitung mundur.
5. Dianjurkan untuk memilih waktu desinfeksi 30 menit untuk isi sekitar setengah dari ruang lemari disinfektan Dan jika isi penuh, disarankan untuk memilih waktu disinfeksi 60 menit.

#### **Tindakan Pencegahan Dalam Penggunaan**

- a. HATI-HATI! Radiasi UVC secara langsung berbahaya terhadap kulit dan mata. HINDARI kontak langsung dengan lampu UVC yang sedang menyala. YTD88 dilengkapi dengan sensor dan saat pintu kabinet terbuka lampu UVC tidak akan menyala sehingga YTD88 aman untuk digunakan.
- b. Hindari anak-anak bermain dengan kabinet ini serta pastikan lampu UVC tidak dilepas; dipindahkan atau digunakan untuk aplikasi atau di tempat lain.
- c. Tabung lampu UVC mengandung merkuri dan perlu penanganan khusus untuk dibuang setelah lampu mati. Bila pecah – segera buka ventilasi (pintu/jendela) ruangan untuk beberapa saat agar tidak terhirup oleh kita.
- d. Radiasi UVC dapat merusak warna dan komposisi material kulit dan polymer – Sehingga disarankan waktu sterilisasi tidak lebih dari 45 menit untuk bahan-bahan tersebut.