

PUSAT LAYANAN
Call Center : 0800-11-TURBO (88726)

Model (YTD88)

Metode Operasi :

Pertama-tama taruh barang-barang yang akan di sterilisasi pada lapisan rak yang sesuai. Kemudian tutup pintu kabinet, nyalakan daya hingga lampu indikator daya menyala, pastikan UV Sterilization Cabinet telah dalam mode *standby*. Pilihlah fungsi yang sesuai dengan yang Anda inginkan.

Mode Layar Sentuh :

1. Setelah mengaktifkan daya, lampu Indikator daya akan menyala dan berada dalam mode *standby*.
2. Tekan tombol "Power" 1 (satu) kali, sampai layar menampilkan kursor "--", yang mengindikasikan bahwa Sterilization Cabinet telah aktif. Lalu masuk ke pilihan Mode fungsi.
 - Tekan tombol "Sterilize" 1 (satu) kali, hingga layar menampilkan pesan "60".
 - Lalu tekan tombol "Sterilize" 2 (dua) kali, hingga layar menampilkan pesan "45".
 - Lalu tekan tombol "Sterilize" 3 (tiga) kali, hingga layar menampilkan pesan "5".Setelah pilihan waktu untuk desinfeksi yang diset telah berkedip 3 (tiga) kali, selanjutnya layar akan berhenti berkedip. Tandanya kabinet desinfeksi telah sesuai dengan waktu yang dipilih untuk dapat memulai aktivitas desinfeksi. Selanjutnya tabung UltraViolet (UV) dan tabung pemanas mulai bekerja, dan layar menampilkan pilihan waktu yang diset dan mulai menghitung mundur.
3. Anda disarankan untuk mengeset waktu :
 - Sterilisasi 5 (lima) menit untuk material yang disterilkan (seperempat ruang).
 - Pilih waktu sterilisasi 45 menit untuk material yang disterilkan (setengah ruang).
 - Pilih waktu sterilisasi 60 menit untuk material yang disterilkan (memenuhi seluruh ruang).

Tindakan Pencegahan Dalam Penggunaan

- a. HATI-HATI! Radiasi UVC secara langsung berbahaya terhadap kulit dan mata. HINDARI kontak langsung dengan lampu UVC yang sedang menyala. YTD88 dilengkapi dengan sensor dan saat pintu kabinet terbuka lampu UVC tidak akan menyala sehingga YTD88 aman untuk digunakan.
- b. Hindari anak-anak bermain dengan kabinet ini serta pastikan lampu UVC tidak dilepas; dipindahkan atau digunakan untuk aplikasi atau di tempat lain.
- c. Tabung lampu UVC mengandung merkuri dan perlu penanganan khusus untuk dibuang setelah lampu mati. Bila pecah – segera buka ventilasi (pintu/jendela) ruangan untuk beberapa saat agar tidak terhirup oleh kita.
- d. Radiasi UVC dapat merusak warna dan komposisi material kulit dan polymer – Sehingga disarankan waktu sterilisasi tidak lebih dari 45 menit untuk bahan-bahan tersebut.

Batch 2